

# Synchronisation de l'orthopédie de **Classe II** et de l'alignement dentaire



**Advansync**<sup>™</sup> 2  
CLASS II MOLAR-TO-MOLAR

# Synchroniser l'avancement mandibulaire et le traitement orthodontique

Un des défis les plus courants, sinon majeur, en orthodontie consiste à corriger les malocclusions de classe II. Si les casques, élastiques ou autres appareils permettent de traiter des cas de Classe II, la plupart d'entre eux ne corrigent pas les malocclusions mais aident à l'avancement de la mâchoire inférieure.



La mise en place d'AdvanSync 2 est simple et peut être réalisée en même temps que la pose d'un appareil multibagues. Conçu avec l'aide de grands spécialistes des corrections de Classe II, l'AdvanSync 2 a pour ambition de répondre aux attentes de vos patients et d'obtenir les résultats promis dans le cadre de votre plan de traitement.

## Traitement de Classe II aussi rapide qu'un traitement de Classe I

- Placé simultanément à l'appareil multibagues, plus besoin de traitement en deux phases.
- Offre une activation permanente, ne nécessite plus la coopération du patient
- Améliore instantanément la position de la mandibulaire

## Conçu pour une correction réussie

- Filetage renforcé Spirallock qui optimise l'engagement de la vis
- Moule sophistiqué en métal injecté, synonyme de longue durée de vie et de robustesse
- 2 ancrages possible distant de 4mm sur la couronne maxillaire mais également sur la couronne mandibulaire augmentent les possibilités d'activation tout au long du traitement
- L'électropolissage permet une plus grande fluidité de fonctionnement

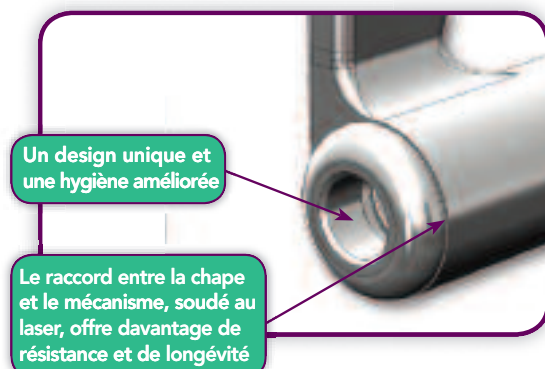
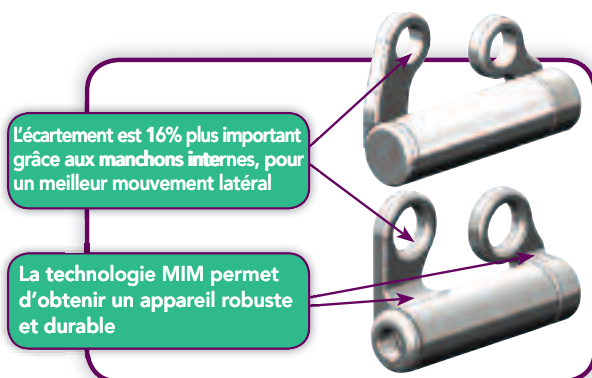


## Pratique et facile à utiliser


- Facile à installer
- Permet simultanément le collage des brackets (5 à 5) en même temps que l'appareillage Advansync2
- Activation intégrée – pas besoin de modifier les bras pour finaliser l'activation

## Plus de confort, des patients satisfaits

- Les bras sont 50 % plus courts que dans les appareils Herbst traditionnels, ce qui réduit l'inconfort et l'irritation de la joue
- **Se place plus postérieurement dans la bouche que les autres appareils Herbst, pour davantage de discrétion**
- Facilite les mouvements latéraux de la mandibule
- Sans incidence sur la locution

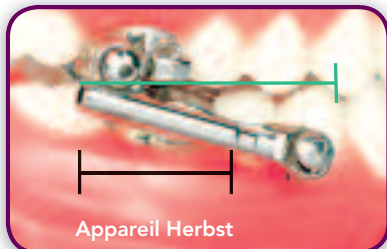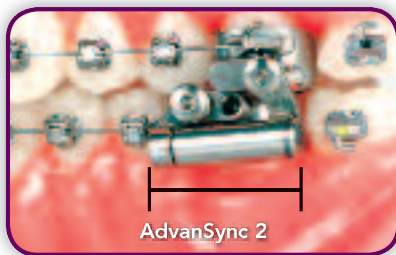

Les bras d'AdvanSync sont 50% plus courts que les bras des appareils Herbst traditionnels, ce qui accroît le confort du patient. En outre, AdvanSync se place plus postérieurement dans la bouche, ce qui le rend discret.

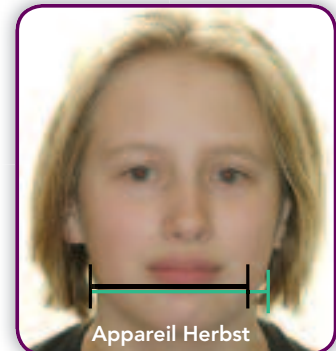

Le patient ci-dessus porte un AdvanSync 2 à gauche et un appareil de Herbst à droite. La faible occupation d'AdvanSync 2 apporte un grand confort en bouche, ce qui augmente les chances d'acceptation du traitement par le patient.

**AdvanSync<sup>™</sup> 2**  
CLASS II MOLAR-TO-MOLAR



## Plusieurs options disponibles, pour satisfaire les besoins du patient et du praticien

### Kit 5 patients - Ormco

Pour un appareil discret dont la mise en oeuvre est simple et immédiate, le Kit patient d'Ormco met à votre disposition les composants nécessaires pour démarrer un traitement simultané.

#### Contenu du kit patient

Tiges / Télescopes	20	Espaceurs de 2mm	80
Vis	40	Cales d'extension	20
Couronnes supérieures	20	Grandes clés	2
Couronnes inférieures	20	Petites clés	3
Espaceurs d'1 mm	40		

Accessoires	Réf.	Quantité
Espaceurs 1 mm	600-4271	30
Espaceurs 2 mm	600-4272	30
Espaceurs 4 mm	600-4273	20
Câles d'Extension	600-4278	10
Clé hexagonale petite	600-4290	1
Clé hexagonale grande	600-4291	1
Vis de fixation	600-4270	20
Modèle de démonstration	717-1002	1
Bras télescopiques gauche	600-4240	5
Bras télescopiques droit	600-4241	5
Tubes rectangulaires 6,5mm	600-4281	10
Manuel d'instruction (Anglais)	070-5672	1

Accessoires	Réf.	Quantité
Couronne molaire sup N°4 G	600-4204	5
Couronne molaire sup N°5 G	600-4205	5
Couronne molaire sup N°6 G	600-4206	5
Couronne molaire sup N°7 G	600-4207	5
Couronne molaire sup N°4 D	600-4214	5
Couronne molaire sup N°5 D	600-4215	5
Couronne molaire sup N°6 D	600-4216	5
Couronne molaire sup N°7 D	600-4217	5
Couronne molaire inf. N°4 G	600-4224	5
Couronne molaire inf. N°5 G	600-4225	5
Couronne molaire inf. N°6 G	600-4226	5
Couronne molaire inf. N°7 G	600-4227	5
Couronne molaire inf. N°4 D	600-4234	5
Couronne molaire inf. N°5 D	600-4235	5
Couronne molaire inf. N°6 D	600-4236	5
Couronne molaire inf. N°7 D	600-4237	5

G : gauche D : droite

**AdvanSync<sup>™</sup> 2**  
CLASS II MOLAR-TO-MOLAR

Pour de plus amples informations sur AdvanSync 2, contactez votre représentant Ormco.



**Ormco<sup>™</sup>**  
Your Practice. Our Priority.

**Ormco France SAS**

6, Square de l'Opéra Louis Jouvet - 75009 Paris

Advansync2 est un dispositif médical de classe IIa pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé, indiqué pour le déplacement des dents dans le cadre d'un traitement orthodontique. BSI CE0086. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice qui accompagne le Dispositif Médical ou sur l'étiquetage.  
Non remboursé par la sécurité sociale.