

# ORMCO l'e-mag n°2

Entre professionnels

MAI/JUIN 2016



Dr Scuzzo

Dr Takemoto

# ALIAS™

SYSTÈME D'ARC DROIT LINGUAL

Conçu par les Drs Kyoto Takemoto et Giuseppe Scuzzo

## Restons connectés !

Vous avez été nombreux à vous inscrire en novembre pour recevoir le n°1 de l'e-mag Ormco. Nous vous invitons à découvrir aujourd'hui notre 2<sup>e</sup> édition. Celle-ci comporte entre autres un article exceptionnel du Dr Takemoto d'un cas traité en Alias. Les Drs K. Takemoto et G. Scuzzo sont à l'origine de l'élaboration de ce tout premier autoligaturant lingual passif Ormco.

Vous pourrez également consulter un article très intéressant du Dr D. Ianni-Filho sur le traitement des béances, ainsi que des astuces sur le choix des torques en système Damon communiquées par le Dr Mavreas.

En espérant que ce nouveau numéro riche en documents scientifiques renforcera ce lien professionnel entre vous et nous.

Bonne lecture.



**Xavier Cherbavaz**  
*Directeur France  
et Marchés Emergents*

## Exclusif !

**2 ARTICLES  
SCIENTIFIQUES**

Dr **TAKEMOTO** et  
Dr **IANNI-FILHO**

p. 3

- p. 2/3 Les cours et évènements
- p. 4/5 Nos infos produits
- p. 6 Les astuces des praticiens
- p. 7 Vos infos pratiques
- p. 8 Vos contacts dédiés



# Les cours et événements

6, 7 ET 8 OCTOBRE 2016

## Forum Ormco France

Save the date !

Des conférenciers de renommée internationale vous donnent rendez-vous au **Cap d'Antibes**, afin de partager leur expérience dans les thématiques suivantes :

- Le système Damon dans tous ses états
- L'orthodontie digitale à travers la plateforme Insignia
- Le management du cabinet au quotidien.

*Le dîner de Gala se tiendra le **vendredi 7 octobre** dans les magnifiques salons et terrasses du Park Mougins-Lenôtre ; le Cocktail de bienvenue aura lieu à la Villa Eilen Roc **jeudi 6 octobre**.*

*Les navettes seront assurées pour ces 2 événements depuis le Palais des Congrès.*



**FORUM 2016**  
Du 6 au 8 octobre | Antibes Juan-les-Pins

Avec la participation des Docteurs : C. Chang, A. Bagden, J. Kozlowski, S. Palleck, P. Van Steenberghe, B. Nourry, G. Caccianiga, J.D. Sebaoun, S. Ellouze, F. Darqué, M. Geserick, C. Lemasson et Z. Bentahar.

Inscrivez-vous vite !



2



## 30 SEPTEMBRE, 1<sup>ER</sup> OCTOBRE 2016 Insignia Global Users Meeting

### 6<sup>ème</sup> Symposium dédié aux utilisateurs de la technique INSIGNIA

Cet événement réunira à **New York** des conférenciers et praticiens utilisateurs du monde entier. Grâce au système Insignia, Ormco conçoit et réalise des traitements orthodontiques sur mesure dont les résultats sont prédictibles, reproductibles et conformes au set up virtuel travaillé et validé dans le logiciel Insignia Approver par l'orthodontiste.

RETROUVEZ TOUS NOS COURS ET ÉVÉNEMENTS SUR **ORMCO.FR**  
POUR PLUS D'INFORMATIONS : Maria Castagnetta **01 42 66 89 90**

Consultez l'intégralité des cours 2016





## 2 articles scientifiques ! À découvrir :



« *Béance et encombrement sévères traités avec un nouveau système lingual de brackets autoligaturants passifs à slots carrés.* »  
*Cas traité en Alias,*  
**par les Drs Kyoto, Yui et Aya Takemoto**



« *Béances - Technique de l'Arc segmenté de Burstone : une option pour les situations qui demandent des modifications importantes de profil sans chirurgie* »  
**par le Dr Daniel Ianni Filho**



**Téléchargez**

L'ARTICLE



**Téléchargez**

L'ARTICLE

3

Consultez les CV de nos conférenciers



## Nouveautés Cours 2016



• **L'ORTHODONTIE LINGUALE REVISITÉE, LE 1<sup>ER</sup> BRACKET AUTOLIGATURANT PASSIF.**  
**Prof. G. Scuzzo**

**10 et 11 septembre 2016**, Paris, Hotel Hilton Opéra.  
**10 et 11 décembre 2016** (lieu à confirmer)

À l'issue de ce cours vous recevrez une certification d'utilisateur du système Alias.

**Inscrivez-vous vite, cours limité à 30 places.**



• **SÉMINAIRES DE COACHING :**

Offrez-vous des formations en lien direct avec votre **pratique quotidienne**, avec **Mme Christelle Cauchois**, coach diplômée de l'Université Paris VIII.

Judi 20 juin à Paris :  
« *Recruter : un enjeu stratégique* »

Lundi 19 septembre à Paris :  
« *Mieux communiquer avec nos patients* »

Judi 15 décembre à Paris :  
« *Développer un réseau de correspondants* »

COMMUNIQUEZ VOTRE N° DE PORTABLE LORS DE VOTRE INSCRIPTION À NOS SÉMINAIRES, ET RECEVEZ VOTRE CONFIRMATION D'INSCRIPTION PAR SMS AINSI QU'UN SMS DE RAPPEL 48H AVANT LE COURS.



**PRATIQUE !**



# Nos infos produits

## ZOOM SUR...



**ALIAS**<sup>TM</sup>  
SYSTÈME D'ARC DROIT LINGUAL  
Conçu par les Drs Kyoto Takemoto et Giuseppe Scuzzo

4

### Nouveau !

*Précision et simplification de la technique linguale avec le **système Alias\****

Les Drs Giuseppe Scuzzo et Kyoto Takemoto alliés à l'équipe R&D d'Ormco ont mis au point le premier système linguale alliant un bracket autoligaturant passif à des arcs droits de haute technologie.

Le bracket autoligaturant passif assure une réduction importante de la friction et un niveau de force optimal, respectueux des tissus mous et des fonctions. De plus, le bracket Alias\* est conçu avec une gorge .018x.018 pour un meilleur contrôle de torque, du TIP et de la rotation.

L'ouverture fermeture des brackets est simple et rapide, elle apporte un confort de travail et une économie de temps pour les praticiens lors des changements d'arcs.

Le profil réduit et arrondi des brackets assure un confort et une hygiène améliorés pour le patient.



**DAMON**<sup>TM</sup>CLEAR2

### Damon Clear 2

***NOUVEAU** : toutes les valeurs de torque (élevé, standard et faible) sont maintenant disponibles en Damon Clear 2 pour le secteur incisivo-canin maxillaire.*

Le bracket Damon CLEAR 2 améliore significativement le contrôle des rotations, grâce à une modification de sa porte tout en offrant une véritable solution esthétique.

Les brackets Damon CLEAR allient tous les avantages de l'autoligation passive à l'exigence des demandes esthétiques des patients. Entièrement fabriqués en alumine polycristalline, ils sont imperméables à la coloration, contrairement aux brackets polycarbonate et aux ligatures conventionnelles.

\* Bientôt disponible.

## Efficacité et efficacité d'un système de brackets orthodontiques CAD/CAM,

par Matthew W. Brown, Lorne Koroluk,  
Ching-Chang Ko, Kai Zhang, Mengqi  
Chen et Tung Nguyen.  
Kingston and Chapel Hill, États-Unis.



Consultez l'article de  
l'*American Journal Orthodontics and  
Dentofacial Orthopedics* (Déc. 2015)

## INSIGNIA : les atouts

*Insignia, solution de brackets et  
d'arcs individualisés, est un  
système permettant de :*

- **Planifier** et **coordonner** votre traitement orthodontique vestibulaire,
- **Améliorer** sensiblement votre collage grâce aux guides de positionnement (collage indirect),
- **Réduire** vos rendez-vous patient (écart entre chaque rendez-vous : 8 à 10 semaines),
- **Offrir** à votre patient un sourire sur mesure grâce aux brackets individualisés (PSL).

*Le système Insignia a été comparé  
à 2 autres techniques de collage :*

- Traitement en Damon et collage **indirect**.
- Traitement en Damon et collage **direct**.



## — EXPÉDIER — PLUS VITE !

Afin de vous apporter un service optimal, **notre service préparation et expédition de commandes travaille maintenant de 8h à 20h.**

Ainsi votre commande peut être **expédiée le jour même si elle est passée** auprès du service client **avant 16h00.**



5

## ORMCO : certifié AEO !

Le 18 février 2016, Ormco a été certifié AEO (Opérateur Economique Autorisé) par le service des douanes. Ainsi les formalités d'importation sont simplifiées, **ce qui pourra réduire nos délais d'approvisionnement.**

## ORMCO plus écolo

Désormais, nous utilisons des boîtes d'expédition ciglées Ormco munies de bandes de déchirement pour faciliter l'ouverture. Pour caler les produits dans la boîte, nous utilisons des sachets gonflables biodégradables, **réduisant les déchets à moins de 5%.**



# Les astuces des praticiens

## Système de forces : la sélection de torques.

Par le Dr Maureas

« Ce rapide compte-rendu vise à clarifier certains aspects de la sélection de torque, directement liée au système Damon. Il pourra également être utile à d'autres praticiens, quel que soit le système de brackets utilisé.

Un article récemment publié dans l'European Journal of Orthodontics (Mavreas et...)' a montré que les opinions divergent quant à la valeur et la direction du torque nécessaires pour un traitement efficace. (...) »



*Demandez au patient de se lever et de sourire afin de visualiser quelle serait la position dentaire après la 1<sup>ère</sup> phase de traitement (nivellement et alignement).*

6



Lire la suite de l'article.

## Insignia Academy, une session riche en expérience.

Par le Dr Mariani

La 1<sup>ère</sup> édition de l'International Insignia Academy s'est déroulée les **8 et 9 février en Californie à Glendora et Newport Beach** avec les orthodontistes utilisateurs suivants : Philippe Van Steenberghe, Anne Simon-Pierson, Christophe Dunglas, Jean-David Sebaoun, Bernard Nourry, Serge Dahan, Stéphane Houllier, Philippe Mariani, Marc Deviot, Yann Le Carboulec.



*Le groupe lors de la visite des usines Ormco à Glendora (CA).*

**L'objectif de cette conférence était multiple :**

- Aller à la rencontre des techniciens afin d'optimiser la qualité des « setups » c'est-à-dire la mise en fonction du plan de traitement,
- Visiter les usines de fabrication et comprendre toutes les étapes de l'individualisation du bracket Insignia SL,
- Favoriser un échange de qualité entre les utilisateurs de cette technique.



Lire la suite de l'article.

# BREF RETOUR SUR LES SÉMINAIRES ORMCO

## ✓ COURS SUR LES ATM du Dr E. Menzel, Paris, avril 2016.

Travaux pratiques, diagnostic en temps réel et manipulations sur patient étaient à l'ordre du jour du cours du Dr Menzel sur le traitement et le diagnostic des troubles de l'ATM.



*Dr Menzel à Paris*



## ✓ SEMAINE INTERUNIVERSITAIRE

Lors de la semaine interuniversitaire de Montpellier, les étudiants ont pu assister à une conférence du **Dr Dahan** sur le système Insignia. Cette présentation a réuni plus de 200 étudiants.



*Une belle réussite pour la rencontre à Dubaï.*

## ✓ MENA Symposium Dubaï

Le 2<sup>e</sup> MENA Symposium, (Middle East & African Countries), qui s'est déroulé à Dubaï en décembre 2015 a réuni plus de **300 orthodontistes de 35 nationalités**. Un franc succès pour cette 2<sup>e</sup> édition qui sera réitérée en 2017.

## ✓ SYMPOSIUM ORMCO EN INDE


Le 1<sup>er</sup> Symposium Ormco indien s'est déroulé les 24 et 25 avril à New Delhi. De nombreux conférenciers étaient présents dont les Drs Alan Bagden, Skander Ellouze, Gurkeerat Singh et CS Ramachandra. Il a réuni plus de **200 orthodontistes provenant de toute l'Inde**.



*Le groupe réuni en Inde*

# Vos contacts dédiés

Voici les numéros verts dédiés de vos chargés de clientèle

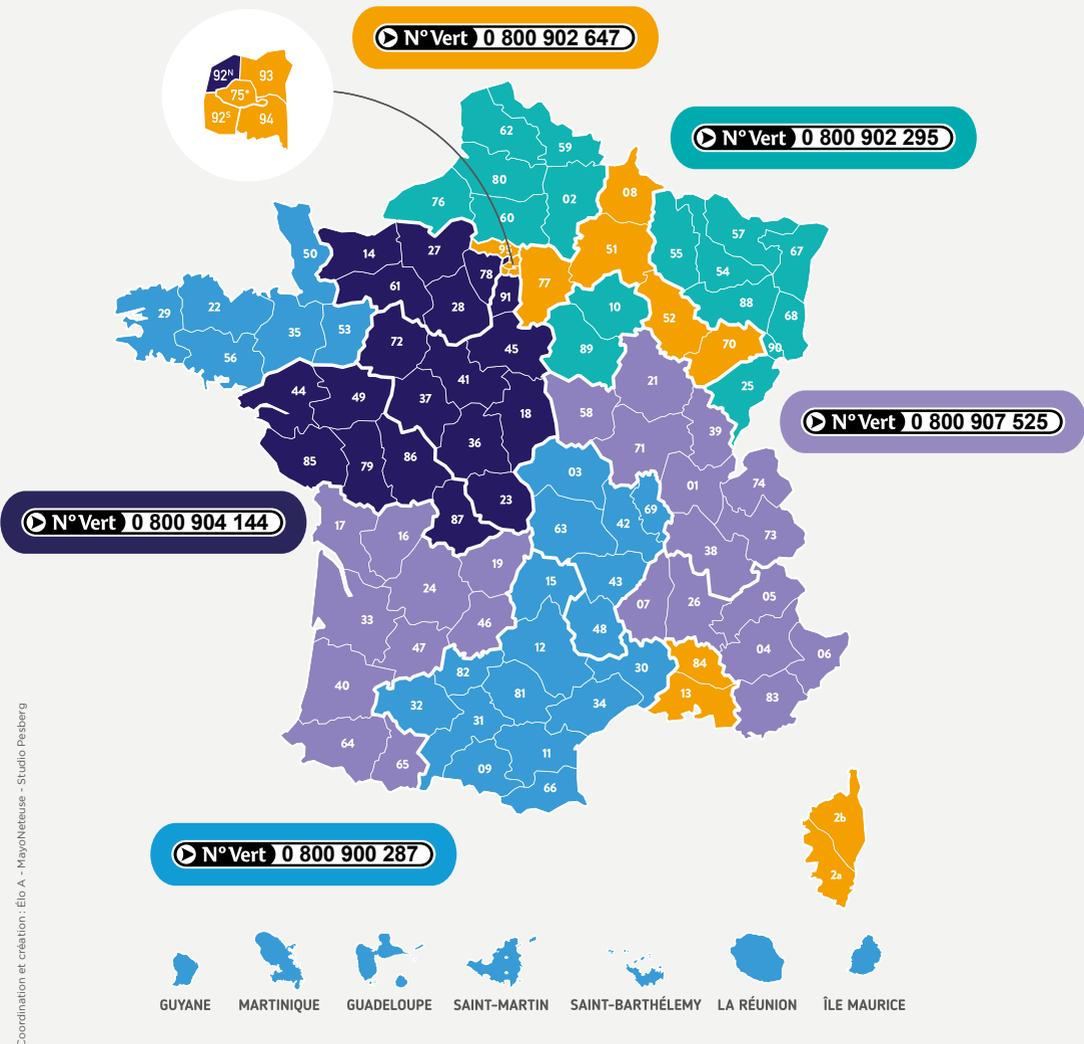

Contactez également votre équipe Ormco France



Directeur France  
et Marchés Emergents  
**Xavier Cherbavaz**  
+33 1 49 88 60 60



Responsable France  
& Afrique du Nord  
**Nathalie Foulon**  
+33 6 03 48 79 26



Responsable régional  
zone A  
**Fabrice Andréani**  
+33 6 67 92 53 46



Responsable régional  
zone B  
**Guillaume Burnel**  
+33 6 03 80 98 05



Responsable Digital  
**Ahmed Dahbi**  
+33 6 65 33 25 99