

DAMON ULTIMA™ SYSTEM



UN SYSTÈME UNIQUE PERMETTANT
UNE EXPRESSION COMPLÈTE DES 3 ORDRES



LA RÉVOLUTION DAMON ULTIMA™

Damon Ultima est le premier dispositif orthodontique permettant une expression complète du torque, pour des finitions plus rapides et plus précises. Entièrement repensé pour réduire le jeu à son minimum ce dispositif permet un contrôle précis de la rotation, de l'angulation et du torque.



“ Le premier couple arc-brackets permettant l'expression complète du torque. ”

- Dr. Dwight Damon


UN SYSTÈME INTÉGRÉ POUR UN MINIMUM DE JEU

Grâce à son arc rectangulaire breveté dont les petits côtés sont arrondis et à sa gorge en forme de parallélogramme, le système Damon Ultima permet d'obtenir directement les points de contact horizontaux et verticaux.



Auto-ligaturant passif conventionnel

Manque de contrôle
lié à un jeu excessif.

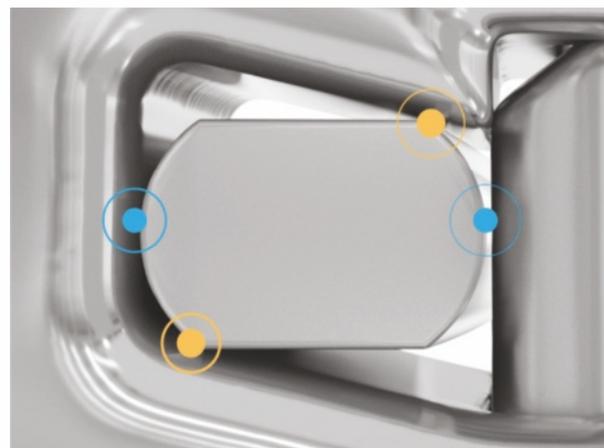

SYSTÈME DAMON ULTIMA

Quatre points de contact,
pour un contrôle précis de la
rotation, de l'angulation et du
torque.

CONTROLE PRECIS DE LA ROTATION, DE L'ANGULATION ET DU TORQUE SANS AUGMENTER LES NIVEAUX DE FORCE NI LA FRICTION.

Un contrôle des rotations obtenu dès le 1er arc Damon Ultima rectangulaire à bords arrondis .014x.0275. Un contrôle complet de l'angulation et du torque obtenu avec le second arc Damon Ultima rectangulaire à bords arrondis .018x.0275.

SÉQUENCE D'ARCS CLASSIQUE



Arcs ronds
.014, .018 CuNiTi

DAMON ULTIMA
Arc rectangulaire
à bords arrondis
.014 x .0275 CuNiTi

DAMON ULTIMA
Arc rectangulaire
à bords arrondis
.018 x .0275 CuNiTi



ROTATION

L'engagement de l'arc Damon Ultima rectangulaire à bords arrondis apporte les points de contacts horizontaux qui vont permettre de corriger la rotation.



ANGULATION


La gorge en parallélogramme génère les points de contact verticaux qui vont permettre un contrôle de l'angulation plus tôt dans le traitement.



TORQUE

La gorge en parallélogramme génère les points de contact verticaux qui vont permettre l'expression complète du torque sans avoir à augmenter les niveaux de force.

OPTIONS DE LINGUOVERSION / LABIOVERSION POUR UN MEILLEUR CONTRÔLE DU TORQUE

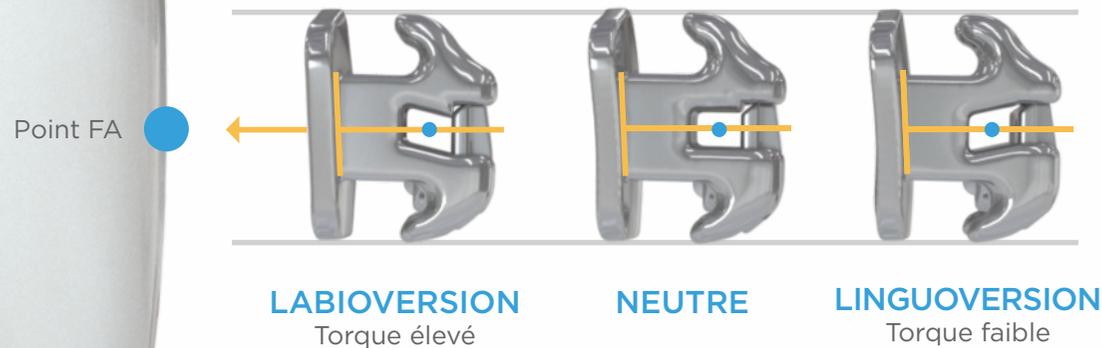

Afin de faciliter le placement et les finitions, le bracket Ultima a été conçu pour que les centres des gorges soient alignés quel que soit le type de bracket utilisé. Le bracket Ultima est conçu pour exprimer le torque souhaité en étant positionné au point FA de Andrews (point médian de l'axe de la couronne clinique).

OPTIONS D'ARCS SUPPLÉMENTAIRES

- .019X.0275, .020X.0275, .021X.0275 CuNiTi, TMA, et Acier
- .016X.0275 Acier pour la correction transversale et le nivellement



DISPOSITIF AMÉLIORÉ : SIMPLE, PRATIQUE ET FIABLE*



Des ailettes entièrement repensées, pour une rétention optimale des chaînettes



Un volet facile à ouvrir et à fermer pendant toute la durée du traitement




Un volet biseauté côté intérieur pour faciliter la fermeture du bracket en cas d'interférence avec l'arc




Des ailettes profilées pour plus de confort et moins d'interférences occlusales



La base en treillis de calibre 80 permet une adhérence optimale tout au long du traitement et une dépose facile

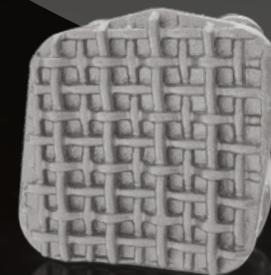

La base rhomboïde avec ligne médiane gravée pour un placement optimal du bracket

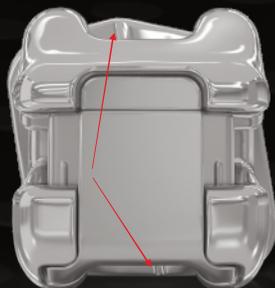

Une gorge verticale permet l'insertion facile d'un crochet amovible conçu pour l'utilisation durable des élastiques et auxiliaires Ormco



LISTE DES RÉFÉRENCES

MAXILLAIRE	Références	Description
Centrale Neutre	333-2100	U1L Damon Ultima .022 T+7°/A +5°/R 0° Neutre 10/PK
	333-1100	U1R Damon Ultima .022 T+7°/A +5°/R 0° Neutre 10/PK
Centrale Linguoversion	333-2110	U1L Damon Ultima .022 Linguoversion 10/PK
	333-1110	U1R Damon Ultima .022 Linguoversion 10/PK
Centrale Labioversion	333-2120	U1L Damon Ultima .022 Labioversion 10/PK
	333-1120	U1R Damon Ultima .022 Labioversion 10/PK
Latérale Neutre	333-2200	U2L Damon Ultima .022 T+3°/A +9°/R 0° Neutre 10/PK
	333-1200	U2R Damon Ultima .022 T+3°/A +9°/R 0° Neutre 10/PK
Latérale Linguoversion	333-2210	U2L Damon Ultima .022 Linguoversion 10/PK
	333-1210	U2R Damon Ultima .022 Linguoversion 10/PK
Latérale Labioversion	333-2220	U2L Damon Ultima .022 Labioversion 10/PK
	333-1220	U2R Damon Ultima .022 Labioversion 10/PK
Canine Neutre	333-2300	U3L Damon Ultima .022 T-2°/A +5°/R 0° Neutre 10/PK
	333-1300	U3R Damon Ultima .022 T-2°/A +5°/R 0° Neutre 10/PK
Canine Linguoversion	333-2310	U3L Damon Ultima .022 Linguoversion 10/PK
	333-1310	U3R Damon Ultima .022 Linguoversion 10/PK
Canine Labioversion	333-2320	U3L Damon Ultima .022 Labioversion 10/PK
	333-1320	U3R Damon Ultima .022 Labioversion 10/PK
Prémolaires (Universel) Neutre	333-2400	U4&5L Damon Ultima .022 T-4°/A +2°/R 0° Neutre 10/PK
	333-1400	U4&5R Damon Ultima .022 T-4°/A +2°/R 0° Neutre 10/PK

Références	Description
227-1118	Arc Damon Ultima TMA .018X.0275 10/PK*
227-1116	Arc Damon Ultima TMA .019X.0275 10/PK
227-1122	Arc Damon Ultima TMA .020X.0275 10/PK
227-1123	Arc Damon Ultima TMA .021X.0275 10/PK
227-1161	Arc Damon Ultima CuNiTi avec stops .014X.0275 10/PK *
227-1163	Arc Damon Ultima CuNiTi avec stops .018X.0275 10/PK *
227-1164	Arc Damon Ultima CuNiTi avec stops .019X.0275 10/PK
227-1165	Arc Damon Ultima CuNiTi avec stops .020X.0275 10/PK
227-1166	Arc Damon Ultima CuNiTi avec stops .021X.0275 10/PK
227-1267	Arc Damon Ultima ACIER .016X.0275 10/PK *
227-1271	Arc Damon Ultima ACIER .019X.0275 10/PK
227-1272	Arc Damon Ultima ACIER .018X.0275 10/PK
227-1273	Arc Damon Ultima ACIER .020X.0275 10/PK
227-1274	Arc Damon Ultima ACIER .021X.0275 10/PK

* bientôt disponible.

MANDIBULAIRE	Références	Description
Centrale Neutre	333-3100	L1L Damon Ultima .022 T-1°/A +2°/R 0° Neutre 10/PK
	333-4100	L1R Damon Ultima .022 T-1°/A +2°/R 0° Neutre 10/PK
Centrale Linguoversion	333-3110	L1L Damon Ultima .022 Linguoversion 10/PK
	333-4110	L1R Damon Ultima .022 Linguoversion 10/PK
Centrale Labioversion	333-3120	L1L Damon Ultima .022 Labioversion 10/PK
	333-4120	L1R Damon Ultima .022 Labioversion 10/PK
Latérale Neutre	333-3200	L2L Damon Ultima .022 T-1°/A +4°/R 0° Neutre 10/PK
	333-4200	L2R Damon Ultima .022 T-1°/A +4°/R 0° Neutre 10/PK
Latérale Linguoversion	333-3210	L2L Damon Ultima .022 Linguoversion 10/PK
	333-4210	L2R Damon Ultima .022 Linguoversion 10/PK
Latérale Labioversion	333-3220	L2L Damon Ultima .022 Labioversion 10/PK
	333-4220	L2R Damon Ultima .022 Labioversion 10/PK
Canine Neutre	333-3300	L3L Damon Ultima .022 T-3°/A +5°/R 0° Neutre 10/PK
	333-4300	L3R Damon Ultima .022 T-3°/A +5°/R 0° Neutre 10/PK
Canine Linguoversion	333-3310	L3L Damon Ultima .022 Linguoversion 10/PK
	333-4310	L3R Damon Ultima .022 Linguoversion 10/PK
Canine Labioversion	333-3320	L3L Damon Ultima .022 Labioversion 10/PK
	333-4320	L3R Damon Ultima .022 Labioversion 10/PK
1ère Prémolaire Neutre	333-3400	L4L Damon Ultima .022 T-12°/A +4°/R 0° Neutre 10/PK
	333-4400	L4R Damon Ultima .022 T-12°/A +4°/R 0° Neutre 10/PK
2ème Prémolaire Neutre	333-3500	L5L Damon Ultima .022 T-17°/A +4°/R 0° Neutre 10/PK
	333-4500	L5R Damon Ultima .022 T-17°/A +4°/R 0° Neutre 10/PK

Veillez contacter votre représentant commercial Ormco pour plus d'informations.

Rendez-vous sur ormco.com/ultima

Les produits de la gamme Damon sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE0086 BSI 2797 - Classe II A. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant sur la notice qui accompagne le dispositif médical ou sur l'étiquetage remis. Non-remboursé par les organismes d'assurance santé.

©2021 Ormco Corporation
PN: 762-6211 v. 1

Ormco™

ORMCO BV
Basicweg 20
3821 Amersfoort
The Netherlands